



VIOLATECH

BIOMEDICAL SOLUTIONS

**SCHEDA
TECNICA**

PRODOTTO



NB0316FSFC200318-
R07

Pagina n°
1 di 5

MASCHERINA PROTEZIONE INDIVIDUALE CON ELASTICI

USO: *Dispositivo medico destinato a limitare la trasmissione di agenti infettivi per ridurre l'esposizione ed il contagio da persona a persona, in ambienti sanitari, luoghi pubblici, di lavoro e domestici.*

DESCRIZIONE: mascherine di protezione facciale DPI con elastici a tre strati di tessuto non tessuto laminati a "sandwich" saldati ad ultrasuoni e cuciti. Ogni strato di TNT è strutturato diversamente per la specifica funzione a cui è destinato: protettiva, filtrante, antimacerante. .

STRUTTURA E COMPOSIZIONE:

STRATO ESTERNO: Strato di TNT idrorepellente di colore celeste

STRATO INTERMEDIO: Filtro in TNT privo di fibre di vetro (smooth fibre free filter), di colore bianco con potere filtrante

STRATO INTERNO: Strato in TNT bianco soffice e liscio, privo di fibre libere per un miglior comfort; evita la macerazione, la sensazione di solletico e non lascia pelucchi sul viso. Questo materiale è testato e certificato che non provoca irritazione alla pelle.

NASELLO : Incapsulato in puro alluminio extra - leggero per la conformazione al viso

ANCORAGGI ELASTICI PER LE ORECCHIE: Lunghi elastici atraumatici in morbido cotone resistente anallergico.



VIOLATECH

BIOMEDICAL SOLUTIONS


**SCHEDA
TECNICA**

PRODOTTO



NB0316FSFC200318-
R07

*Pagina n°
2 di 5*

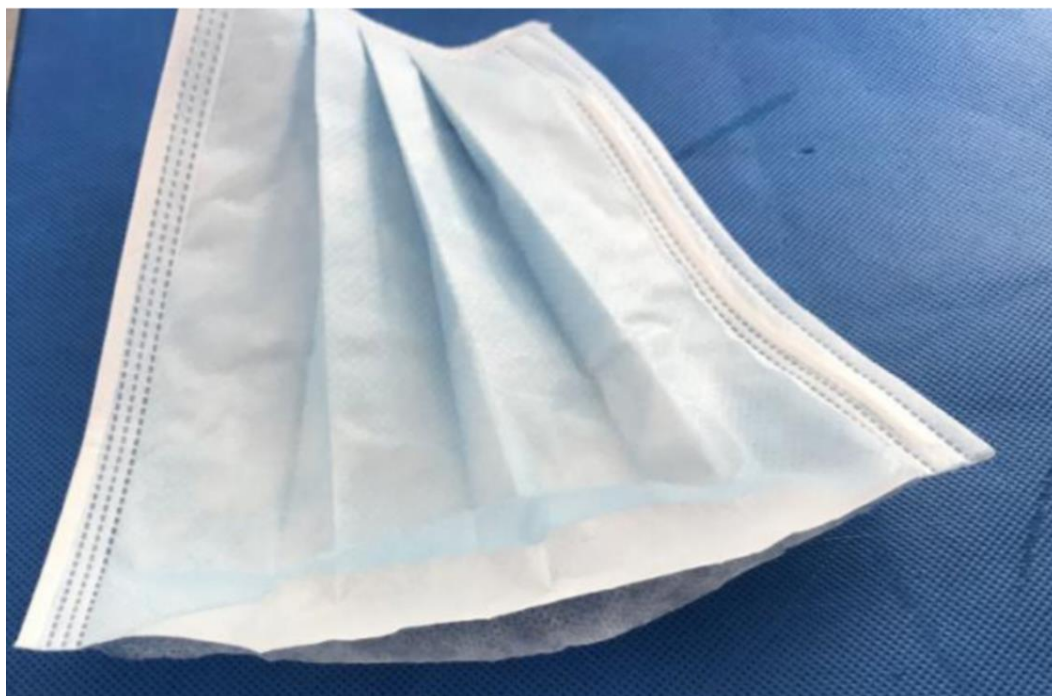



VIOLATECH

BIOMEDICAL SOLUTIONS

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO



NB0316FSFC200318-
R07

Pagina n°
3 di 5



MODO D'USO:

Lavarsi le mani prima di indossare una maschera o tenere le mani lontano dal lato interno della maschera mentre la si indossa per ridurre la possibilità di contaminazione.

Distinguere l'interno e l'esterno della mascherina e la parte inferiore dalla superiore (presenza della striscia di metallo).

Assicurarsi che la mascherina si adatti bene al viso verificando che espirando con forza l'aria non fuoriesca dai bordi



VIOLATECH

BIOMEDICAL SOLUTIONS

**SCHEDA
TECNICA**

PRODOTTO



NB0316FSFC200318-
R07

Pagina n°
4 di 5

1. Posizionare la maschera facciale con la clip per il naso sul lato superiore, il colore celste all'estero e il lato bianco all'interno. Posizionare gli elastici presenti alle estremità sulle orecchie.
2. Praticare una leggera pressione per adattare il supporto nasale al ponte del naso, quindi premere la clip nasale per tirare l'estremità inferiore della maschera sulla mascella inferiore
3. Favorire l'adattamento della maschera per coprire la superficie facciale dal ponte del naso alla mascella inferiore per il miglior effetto protettivo

AVVERTENZE

- Dispositivo monouso. Dopo l'uso, deve essere smaltito in conformità ai requisiti di legge locali
- Non utilizzarlo se la confezione o la maschera sono danneggiate.
- Alle persone con particolari difficoltà respiratorie, come l'asma o l'enfisema, si consiglia di consultare un medico prima di indossarle.
- Usare con cautela in caso di allergia al tessuto non tessuto.
- In caso di irritazioni della pelle dopo l'uso, interrompere l'uso. In casi gravi, consultare un medico.
- Assicurarsi che barba, i capelli o altre condizioni del viso non compromettano l'aderenza del viso alla mascherina.

STOCCAGGIO E STABILITÀ

Si consiglia di conservare in un ambiente pulito, asciutto, ventilato e non corrosivo, lontano da fonti di calore o materiali combustibili.

CONFORME AGLI STANDARD: EN 149:2001 + A1:2009

CODICE PRODOTTO: MK001

Validità: 24 mesi

CONFEZIONE: scatola contenente n. 20 pezzi non sterili



VIOLATECH

BIOMEDICAL SOLUTIONS

**SCHEDA
TECNICA**

PRODOTTO



NB0316FSFC200318-
R07

*Pagina n°
5 di 5*

CLASSIFICAZIONE CND E N° REPERTORIO RDM:

CND	N° REPERTORIO
In attesa di registrazione	In attesa di registrazione

VIOLATECH srl

Via Kenia 74, 00144 ROMA

Tel: 06/5922087 FAX: 06/59290468 EMAIL: info@violatech.it